

眼科用冷凍手術ユニット

キーラー クライオマチック MKII

Cryomatic

さらに進化するキーラー クライオマチック



## 新しいキーラー クライオマチックMKII

### 進化するキーラーのクライオマチック

クライオマチックMKIIでは新しいプローブ連結システムを採用。  
プローブ取付け、取外しがワンタッチになり簡素化されました。

#### 最先端技術の承継

##### ◆ 自動ガス圧選定

ガス圧コントロールの必要がありません。マイクロコンピュータで制御されたソレノイドバルブにより、必要なガス圧がプローブに自動的に供給されます。

##### ◆ パージシステム

ガス圧をオープンにし電源を入れ、プローブを接続した後、パージスタートボタンを押すとパージが自動的に始まり、約90秒で終了します。弱いガス圧で本体・プローブの清掃を自動的に行い、トラブルをより少なくします。

##### ◆ スムーズな冷凍／解凍


最新のソレノイドバルブシステムにより冷凍/解凍がスムーズに行えます。

#### コンソール表示パネル



##### ■ プローブ接続口

ガス圧をオープンにし、電源を入れてからプローブを接続します。パージスタートボタンを押すとパージが作動し、約90秒で終了します。

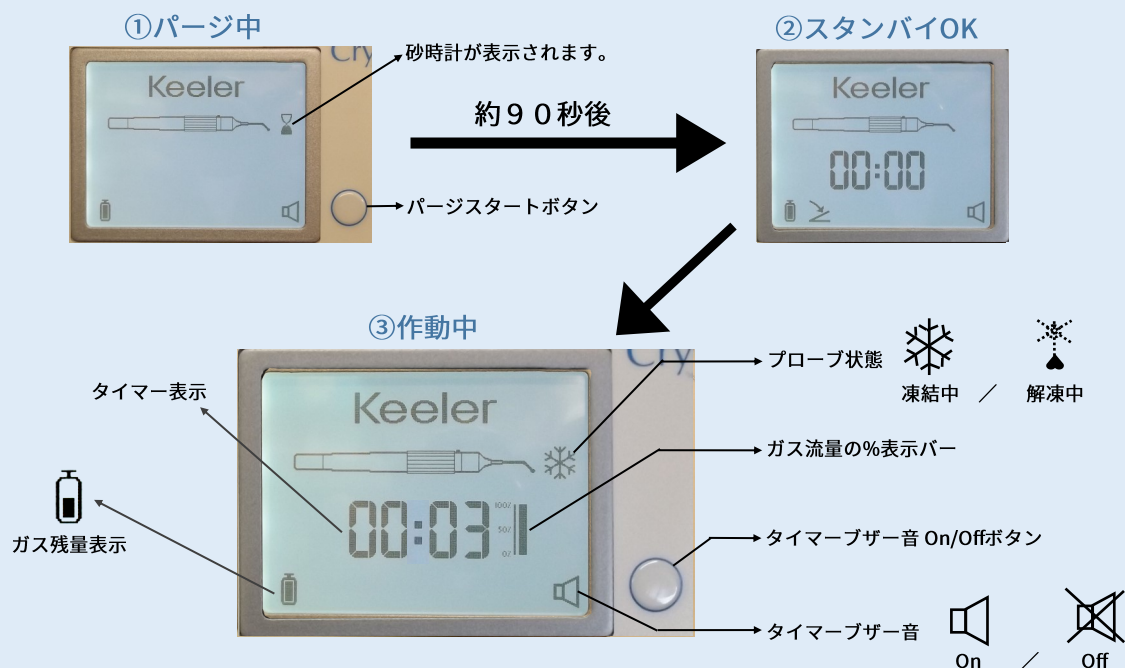

## 専用プローブ（全種エンドフリーズ型）

2509-P-8030



網膜剥離用プローブ 2.5mm スタダード

2509-P-8023



硝子体用プローブ 0.89mm

2509-P-8021



網膜剥離用プローブ 2.5mm ロング

2509-P-8024



白内障用プローブ 1.5mm 曲

2509-P-8022





網膜剥離用プローブ 2.5mm サイドフリーズ


2509-P-8025



緑内障用プローブ 3.0mm

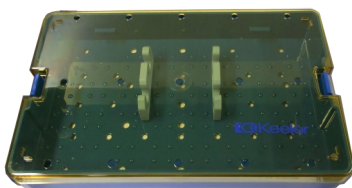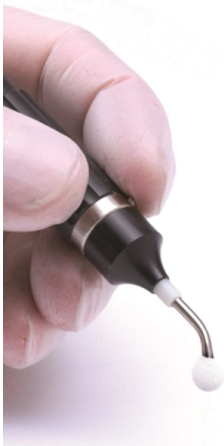

滅菌ケース  
(オートクレーブ用)

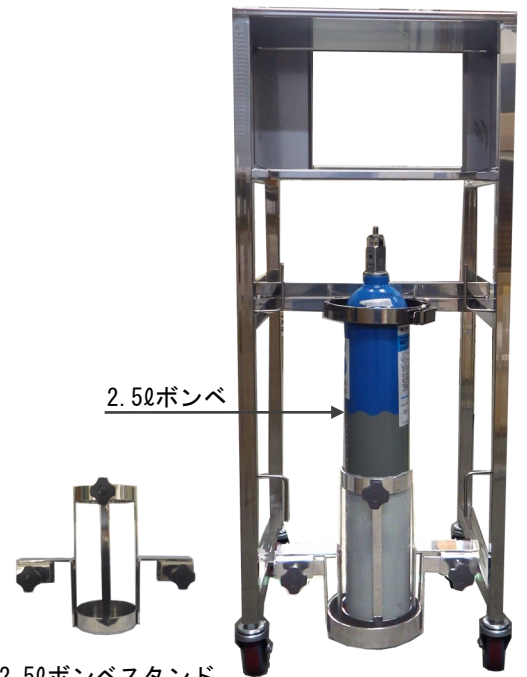

2.5ℓポンベ

2.5ℓポンベスタンド  
(専用架台取付用)

MODEL	商品名	商品内容
M II - 4002	クライオマチック MKII・セットII	本体一式 (2509-P-1010) 網膜剥離用プローブ2.5mmスタンダード1本、 専用架台、CO <sub>2</sub> アダプター

2509-P-1010	クライオマチック MKII 本体	本体一式 (電源コード、高圧ホース、フットスイッチ、 排気ホース付)
-------------	------------------	---------------------------------------

各種プローブ		
2509-P-8030	網膜剥離用プローブ 2.5mm スタンダード	
2509-P-8021	網膜剥離用プローブ 2.5mm ロング	
2509-P-8022	網膜剥離用プローブ 2.5mm サイドフリーズ	
2509-P-8023	硝子体プローブ 0.89mm	
2509-P-8024	白内障プローブ 1.5mm 曲	
2509-P-8025	緑内障プローブ 3.0mm	

個別付属品		
2509-P-8011	高圧ホース	本体とポンベの接続用
2509-P-8013	フットスイッチ	プローブ作動用フットスイッチ
KCM-001-II	専用架台	ステンレス製、ポンベ縦置き型
2508-P-7015	ヨーク式 炭酸ガス (CO <sub>2</sub> ) アダプター	 (ヨーク取付部形状) ヨーク式 <b>炭酸ガス</b> ボンベアダプター
2508-P-7017	ヨーク式 笑気ガス (N <sub>2</sub> O) アダプター	 (ヨーク取付部形状) ヨーク式 <b>笑気ガス</b> ボンベアダプター
—	CO <sub>2</sub> ポンベ	炭酸ガスポンベ 容量7.5リットル
—	N <sub>2</sub> Oポンベ	笑気ガスポンベ 容量7.5リットル
2508-P-8021	滅菌ケース	オートクレーブ用
KYS-2.5	2.5ℓポンベスタンド	専用架台取付用2.5ℓポンベスタンド


## 仕様

本体寸法	350mm (幅) × 200mm (奥行) × 190mm (高さ)
本体質量	4.5kg
入力電圧	AC 100V (50/60Hz)
冷却用ガス	炭酸ガス (CO <sub>2</sub> ) 又は笑気ガス (N <sub>2</sub> O) 非サイフォン式ポンベ使用
処置圧	各プローブに対して自動制御

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがあります。

承認番号： 22300BZX00088000

製造販売元

 株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL 03-3815-7787

FAX 03-5802-5931

URL www.keeler-yna.co.jp

E-mail eigyo-bu@keeler-yna.co.jp

製造元



CA-CRMA202408